

Informacja dla pacjenta *tiologic*® implanty zębowe

Bezpieczeństwo

Estetyka

Komfort



DENTAURUM
IMPLANTS

Znaczenie pięknych i zdrow



tiologic®



patienteninfo tiologic® zahnimplantate ▾ de


Piękne zęby –

dobre samopoczucie i pewność siebie

Zęby odgrywają decydującą rolę przy pierwszym kontakcie. Promieniującym uśmiechem człowiek wzbudza sympatię. Piękne i zdrowe zęby sygnalizują prawidłowe użębie, co oznacza, że jedzenie, odczuwanie smaku i wymowa nie są zaburzone. Piękne stałe zęby symbolizują zdrowie, piękno i młodość. Sprawiają radość życia i dają pewność siebie

Jak istotne są piękne zęby w kontaktach z innymi, potwierdzają liczne badania

Co sprawia, że człowiek odbierany jest jako atrakcyjny?

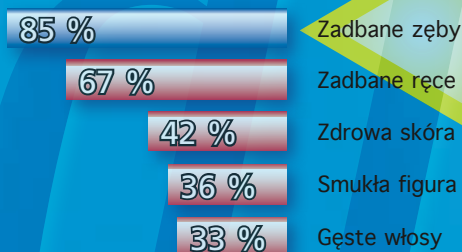

Emnid-Umfrage Juni 2002, befragt wurden 1200 Bundesbürger, ©Colgate



Własne zęby nie są wieczne, niestety.

Brak zęba u dzieci jest „słodki”, w późniejszym wieku jest jednak dużym problemem. Czy to przez wypadek, czy podczas uprawiania sportu, z powodu choroby lub po prostu z powodu wieku brakuje zęba. Duże lub małe luki zębowe nie są estetyczne, w dodatku upośledzają podwójnie.

Powodują ciąg problemów zdrowotnych. Pokarm jest gorzej przeżuwany, mięśnie żucia mogą być jednostronnie obciążane. Może prowadzić to do zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego, aż do bólów głowy włącznie. Dodatkowo kość szczęki lub żuchwy w miejscu utraconego zęba zanika w skutek braku obciążenia. Z tych powodów ważne jest i sensowne, by jak najszybciej zamykać w sposób fachowy luki zębowe.

Implanty zębowe w szczególny sposób są do tego przeznaczone. Na następnych stronach dowiesz się jakie są zalety uzupełnienia opartego na implantach i dlaczego będziesz się znowu szeroko uśmiechać.



Czym jest implant

Implanty są sztucznymi korzeniami zębów. Wkładane są, implantowane lub jak lekarz mówi wprowadzane w miejscu brakującego zęba. Do takiego sztucznego korzenia, który wrośnięty jest mocno w kość montowana jest sztuczna nadbudowa, która perfekcyjnie naśladuje naturalną koronę zęba. Mówi się tu o tak zwanej supra-konstrukcji. Razem tworzą jedność uzupełnienie protetyczne na implancie – Twój nowy uśmiech.


Takimi uzupełnieniami protetycznymi na implantach mogą być zamykane przeróżne rodzaje braków, w sposób estetyczny, funkcjonalny i komfortowy. Więcej na ten temat na kolejnych stronach.

Większość implantów wykonana jest z biozgodnego tytanu, High-Tech metalu, który stosowany jest z powodzeniem w medycynie od wielu lat.

W ścisłej współpracy pomiędzy lekarzem a technikiem dentystycznym powstaje małe dzieło sztuki, które porównując do naturalnego zęba nie jest do odróżnienia. Można mówić o unikatach powstałych w dentalnej manufakturze.

Przy tych wszystkich dobrych wieściach, należy pamiętać, że nie u każdego można zastosować implanty, w sytuacjach kiedy niektóre schorzenia niosą ze sobą ryzyko utrzymania implantu. Zapytaj lekarza, czy możesz mieć implanty.

Musisz mieć też świadomość, że perfekcyjna higiena jest wymogiem długotrwałego funkcjonowania Twojego zęba na implancie.

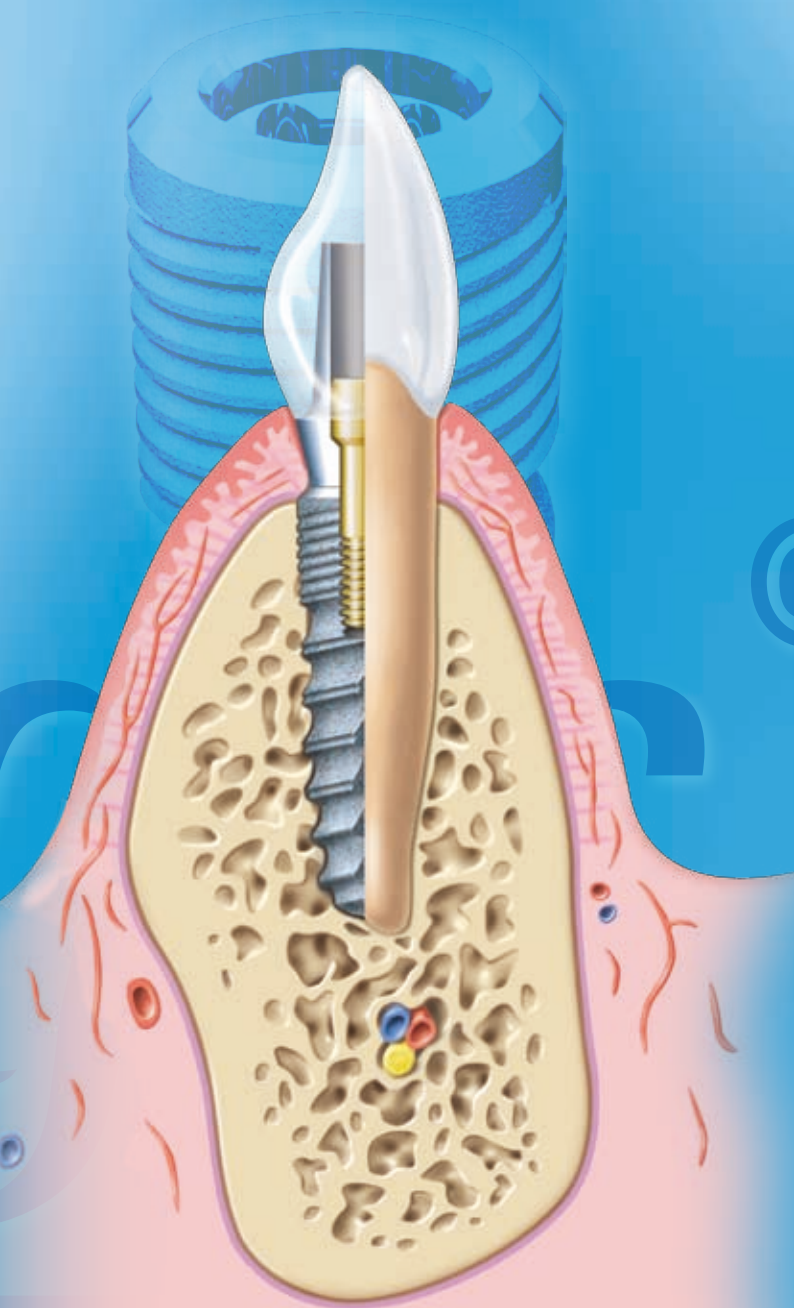

Implanty – naturalne ro



informacja dla pacjenta tiologic® implanty pl

Zalety implantów i uzupełnienia opartego na implantach.

- ▼ **Najbliższe naturze**
Perfekcyjna estetyka
- ▼ **Przyjemne wrażenie w buzi**
Jak przy naturalnych zębach
- ▼ **Na stałe i stabilne**
Jedzenie i życie jak własnymi zębami
- ▼ **Pewne, bezpieczne trzymanie protezy**
Większy komfort
- ▼ **Nie trzeba szlifować zdrowych zębów**
Oszczędzają zdrowe zęby
- ▼ **Brak upośledzania mowy i odczuwania smaku**
Plus dla jakości życia
- ▼ **Wartościowa kość szczęki lub żuchwy jest utrzymywana**
Więcej bezpieczeństwa

Implanty zębowe – sprawdzone, bezpieczne, komfortowe!

PLUS dla aktywnego życia.

Zapytajcie swojego lekarza w jaki sposób implanty *tiologic®* mogą umilić Ci życie.



Przykład 1 – luka zębowa

Brakuje zęba lub kilku w rzędzie (zdj. 1).

Standardowe rozwiązanie: most

Brakuje zęba w rzędzie, tradycyjnym rozwiązaniem jest most. W tym celu sąsiednie zęby muszą zostać oszlifowane. Oznacza to, że część zęba musi zostać usunięta, by mogła posłużyć jako filar konstrukcji mostu. Zdrowe zęby zostają jakby okoronowane (zdj. 1.2)

Wady takiego rozwiązania:

- ▼ Zdrowe zęby sąsiednie muszą zostać oszlifowane.
- ▼ Zęby filarowe po osadzeniu mostu w przypadku problemów leczone są dużym nakładem.

Lepsze rozwiązanie: pojedynczy implant-ząb

Lepszym rozwiązaniem jest pojedynczy implant-ząb. Na sztuczny korzeń (implant) nakładana jest ceramiczna korona (zdj. 1.3).

Zalety takiego rozwiązania:

- ▼ Ząb siedzi prawie tak mocno jak własny.
- ▼ Nowy ząb wygląda bardzo estetycznie.
- ▼ Nie ma potrzeby szlifowania zdrowych zębów



Przykład 2 – braki skrzydłowe

Brak kilku zębów na końcu łuku zębowego (zdj.2.1).

Standardowe rozwiązanie: proteza szkieletowa – kłamrowa

W przypadku braku kilku zębów na końcu łuku zębowego, standardowym rozwiązaniem jest tak zwana „proteza kłamrowa – szkieletowa”. Klamry takiej protezy otaczają pozostałe zęby, w celu utrzymania protezy. By trzymanie było wystarczające a siły żucia lepiej podzielone, proteza wyposażona jest w metalowy łuk mocowany do przeciwnych zębów (zdj.2.2).

Wady takiego standardowego rozwiązania:

- ▽ Zazwyczaj widoczne klamry, zaburzają estetykę.
- ▽ Gorsza higiena, gdyż zazwyczaj resztki pokarmowe osadzają się na klamrach.
- ▽ Metalowy łuk przeszkadza.
- ▽ Osadzenie nie jest stałe, klamry protezy zawodzą podczas napraw.

Lepsze rozwiązanie: most na implantach

Lepszym rozwiązaniem jest most na implantach. Do sztucznych korzeni – implantów przymocowywana jest konstrukcja mostu z napaloną perfekcyjnie porcelaną (zdj.2.3).

Zalety takiego rozwiązania:

- ▽ Most jest na stałe.
- ▽ Nowe zęby wyglądają bardzo estetycznie. Bez przeszkadzającego łuku.
- ▽ Łatwa higiena.

2.1



2.2



2.3



Przykład 3 – bezzębie

W szczęcie lub żuchwie brakuje wszystkich zębów (zdj. 3.1).

Standardowe rozwiązanie: proteza całkowita

Jeśli brakuje w szczęcie lub żuchwie wszystkich zębów, standardowym rozwiązaniem jest proteza całkowita. Taka proteza w żuchwie ma trzymanie tylko dzięki przyssaniu do wyrostka. W szczęcie dla większego trzymenia proteza taka zakrywa całe podniebienie. Oczywiście jest, że taka proteza ma problemy z utrzymaniem (zdj. 3.2).

Wady takiego standardowego rozwiązania:

- ▼ Ograniczone trzymanie, niski komfort.
- ▼ W szczęcie zakryte jest całe podniebienie, odczuwanie smaku jest przez to upośledzone.

Lepsze rozwiązanie: Proteza na implantach

Lepszym rozwiązaniem jest proteza oparta na implantach. Do sztucznych korzeni przymocowywana jest konstrukcja belki, która gwarantuje zaczepienie protezy. W ten sposób uzyskuje się optymalną funkcję a w szczęcie podniebienie może pozostać otwarte. Odczuwanie smaku nie będzie zakłócone (zdj. 3.3).


Zalety takiego rozwiązania:

- ▼ Proteza utrzymywana jest znacząco lepiej
- ▼ Brak zakrycia podniebienia



implantom

tiologic®

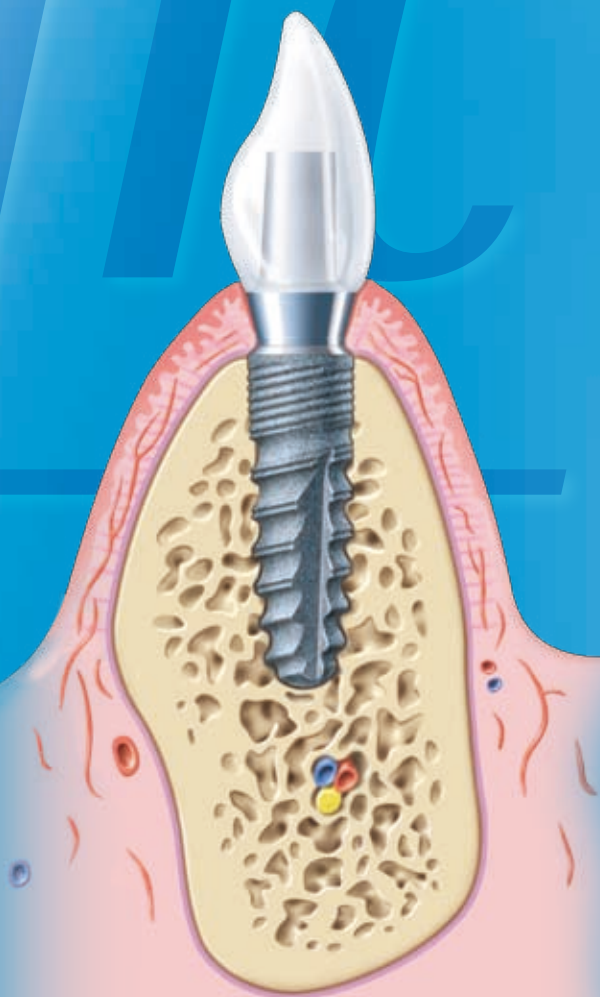

Lepsza jakość życia dzięki



Pracochłonne, ale efektywne.

Na poprzednich stronach zapoznałeś się z zastosowaniem implantów zębowych. Widziałeś: przy braku zęba implanty są najlepszym rozwiązaniem, jeżeli nie ma medycznych przeciwwskazań.

Perfekcyjne zastosowanie i powodzenie implantów zębowych zależy w znacznym stopniu od doświadczenia lekarza i technika dentystycznego. Zabieg chirurgiczny i leczenie są z reguły bardzo bezpieczne, ale pracochłonne. Zrozumiałym jest, że takie rozwiązanie Twojego uśmiechu jest droższe niż standardowe. Nie powinieneś się zrażać – przeciwnie – takie rozwiązanie jest Ciebie warte. Obecnie jest wiele możliwości sfinansowania leczenia na atrakcyjnych warunkach poprzez np. kredyt.

Porozmawiaj z lekarzem lub z Twoim prywatnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Zapytaj również znajomych, którzy mają już implanty, jak są zadowoleni.

Jeżeli zainteresowany jesteś jak przebiega terapia implantologiczna przeczytaj kolejne strony.



Jak przebiega leczenie.

1

Krok 1 – badanie

Na początku lekarz przebadają Cię pod kątem stomatologicznym, a więc sprawdzi występowanie próchnicy lub stanów periodontalnych. W przypadku chorób ogólnych, jeśli takie występują, może zaistnieć potrzeba konsultacji z lekarzem rodzinnym. Zostanie zrobione nowe zdjęcie Rtg, by sprawdzić czy jest wystarczająca ilość kości. Bazując na diagnozie lekarz przeprowadzi wyczerpującą rozmowę przedstawiając jednocześnie plan i koszt leczenia.

2

Krok 2 – Zabieg

Jeżeli jesteś zdrowy i jama ustna jest wolna od stanów zapalnych, może nastąpić zabieg wprowadzenia implantów. Podobnie jak przy ekstrakcji zęba zostaniesz miejscowo znieczulony. Kość wyrostka zostanie odsłonięta, przygotowane łożo pod implant i wprowadzony implant. Na koniec dziąsło zostanie z powrotem zszyte. Z reguły taki zabieg nie trwa zbyt długo.

3

Krok 3 – Faza wgajania

Po wprowadzeniu implantu następuje faza wgajania, która zazwyczaj trwa od 3 do 6 miesięcy, aż implant zostanie wrośnięty. W zależności od jakości Twojej kości, czas ten może zostać skrócony lub wydłużony. W tym czasie implant ochraniaj jest przez pokrywające go dziąsło.





Krok 4 – Nałożenie suprakonstrukcji

Zanim suprakonstrukcja, widzialna część Twojego nowego uzupełnienia zęba będzie mogła zostać przymocowana do implantu, leżące nad implantem dziąsło w znieczuleniu miejscowym musi zostać minimalnie przesunięte na bok. Następnie suprakonstrukcja może zostać na stałe przytwierdzona do implantu.



Krok 5 – Badania kontrolne

Jak tylko uzupełnienie na implantach zostanie zamontowane, ważnym jest, by po uzgodnieniu z lekarzem pojawiać się na regularnych wizytach kontrolnych, by przez długie lata cieszyć się nową jakością życia.



Krok 6 – Dokumentacja

Zwykle otrzymujesz od lekarza po zabiegu paszport implantologiczny, w którym przechowywane są wszystkie ważne dane. Po to, by w razie przeprowadzki inny lekarz mógł dokonywać badań kontrolnych.



Co jeszcze powinieneś wiedzieć



Osoba zaufania – Twój lekarz

Decyzja o implantach dla większości ludzi, pomimo wielu zalet tej nowoczesnej i estetycznej, medycznej metody uzupełnienia protetycznego nie jest łatwa.

Pomyśl, Twój lekarz ma duże doświadczenie w tej dziedzinie, chętnie Cię poinformuje. Na konkretnych przykładach – modelach lub zdjęciach pokaże co jest dzisiaj możliwe.

Powinieneś zadać mu wszystkie nurtujące Cię pytania. Obojętnie, czy o konkretny przebieg zabiegu, możliwe ryzyko, o czas bezpośrednio po zabiegu lub o higienę jamy ustnej.

Jest to ważna decyzja lepszego życia i komfortu.



Notatki do osobistej rozmowy z lekarzem.

DDentaurum Implants, producent implantów tioLogic, jest firmą córką jednego z najstarszych na świecie przedsiębiorstw branży stomatologicznej. Dentaurum jest jednym ze światowych liderów branży techniki dentystycznej oraz ortopedii szczękowej.

www.dentaurum.de

Dentaurum Implants opracowuje w kooperacji z lekarzami oraz technikami dentystycznymi produkty dla implantologii, które od wielu lat stosowane są na całym świecie. Implanty **tioLogic®** powstały przy udziale najnowocześniejszych naukowych metod, przy pomocy precyzyjnych, sterowanych komputerowo maszyn wytworzone oraz szczegółowo przebadane klinicznie.

Porozmawiaj ze swoim lekarzem niezobowiązująco, jak w Twoim przypadku można w pełni wykorzystać możliwości leczenia nowoczesnym systemem **tioLogic®**.

kontakt: